

# Amyloidi

## 4035 Ts-Amyloid

### Patologia

#### Tiedustelut

**Tekniikka:**

014 2691053 Histologian laboratorio

**Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

#### Indikaatio

Amyloidoosidiagnostiikka.

#### Näyte

Histologinen biopsia.

#### Näytteen käsittely

Näyte laitetaan 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus. Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, säilytetään formaliinissa oleva näyte huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

#### Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti tietojärjestelmän kautta.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta ja laboratoriolöydöksistä.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

#### Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini-värijäys, alkaalinen kongopuna-värijäys ja mikroskopointi.

### **Tulkinta/lausunto**

Patologin lausunto.

### **Huomautuksia**