

# Bronkuseritteen irtosolututkimus

4040 Bf-Syto

Patologia

## Tiedustelut

### Tekniikka:

014 2691588 Sytologian laboratorio

### Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

## Indikaatio

Keuhkoputken tai keuhkon malignin kasvaimen diagnostiikka ja hoidon seuranta.

## Näyte

Bronkoskopian yhteydessä otetut huuhtelu-, imu- ja harjairtosolunäytteet.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupissa on liimattava potilastarra, jossa on näytteenumeron viivakoodi.

## Näytteen käsittely

Näytteet fiksoidaan solunäytteen fiksatiivilla (50 % etanoli).

## FIMLAB

Näytettä ei sentrifugoida. Päivystysaikana varmistetaan, että näyte on YSKÖS-FIX purkissa (sis. 50% etanolia).

## Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

## Menetelmä

Sytosentrifuugivalmiste, Papanicolaou-värjäys sekä mikroskopointi.

## Tulkinta/lausunto

Maligniteettiaste, solujakautuma ja patologin lausunto papa-luokissa 3-5. Tarvittaessa lausunto annetaan myös luokan 1-2 näytteille.

## Huomautuksia