

Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus

4043 Ts-PADGast

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691040 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Ruokatorven, mahalaukun ja duodenumin kudosuutosten diagnostiikka

Näyte

[Ks. erillinen ohje](#)

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Gastroskopianäytepurkit numeroidaan sinisellä tussilla.

Mikäli näytteet ovat kiireellisiä, merkitään punaisella tussilla K purkin kanteen.

Näytteen käsittely

Näytteet laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, alcianblue-pas-, giemsa- ja hematoksyliini-eosiinivärjäys sekä mikroskopointi. Muita erikoisvärjäyksiä tai molekyylipatologisia määriytyksiä tehdään tarpeen mukaan.

Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Gastriitin vaikeusaste määritetään Sydney-luokituksen mukaisesti (krooninen tulehdus 0-3+, neutrofiilinen aktiivisuus 0-3+, atrofia 0-3+, suolimetaplasia 0-3+, helikobakteerit 0-3+).

Huomautuksia