

# Kolonoskopianäyte, suolistosyöpäseulonta

6606 Ts-ColSeul

## Patologia

### Tiedustelut

**Tekniikka:**

014 2691040 Histologian laboratorio

**Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

### Indikaatio

Suolistosyöpäseulonnan ulosteen verilöydöksen perusteella tehdyn kolonoskopian yhteydessä otettujen näytteiden histologinen diagnostiikka.

Seulontaan kuulumattomien muutosten pyynnöille on tarkoitettu tutkimus 4764 Kolonoskopianäytteiden histologinen tutkimus.

### Näyte

Kolonoskopiassa tai sigmoideoskopiassa otetut näytteet: suolen eri alueilta otetut näytteet laitetaan omiin eriteltyihin näytekupkeihinsa.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytteenumeron viivakoodi.

### Näytteen käsittely

Näytteet laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

## Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio (**seulonta**) ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

## Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys, mikroskopointi ja muita erikoisvärjäyksiä tai molekyylipatologisia määrityksiä tarpeen mukaan.

## Tulkinta/ lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi)

## Huomautuksia