

Kudosnäyte, immunofluoresenssitutkimus

4053 Ts-PAD-IF

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Immunofluoresenssitutkimusta voidaan käyttää etsittäessä tuorenäytteistä immunoglobuliini- tai komplementtisaostumia.

Huom! Munuaisten ja ihon immunofluoresenssitutkimuksiin ovat omat tutkimusnumerot (4066 Ki-PAD-IF ja 4047 Sk-PAD-IF).

Näyte

Tuorenäyte tutkittavasta kudoksesta.

Näytteen käsittely

Näytteet toimitetaan keittosuolalla kostutetun sideharsotaitoksen sisällä **välittömästi** patologian yksikköön.

Lähetä

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Jääleikemikrotomia, suora immunofluoresenssivärjäys (IgA, IgG, IgM, Komplementti C3 ja fibrinogeeni) sekä fluoresenssimikroskopia.

Tulkinta/ lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.