

# Urogenitaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

## Patologia

6149 Ug-PAD-4

## Tiedustelut

### **Tekniikka:**

014 2691240 Histologian laboratorio

### **Vastaukset:**

014 2691540 Osastonsihteerit

## Indikaatio

Urogenitaalialueen näytteen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määrittäminen.

## Näyte

Urogenitaalialueen näytteet (esim. vulva, cervix, endometrium tai ovario sekä virtsarakko, prostata tai kives).

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytekupissa on liimattava potilastarra, jossa on näytteenumeron viivakoodi.

## Näytteen käsittely

Virka-aikana tuorenäyte. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

Muulloin näyte laitetaan 10 % formaliiniin, jonka tilavuuden tulee olla vähintään 10-kertainen näytteeseen nähden.

## Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

**Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.**

## Menetelmä

Patologi dissekoi leikkauspreparaatit ja ottaa niistä näytteitä. Näytteet ja loput leikkauspreparaatista fiksoidaan 10 % formaliinilla. Parafiinitekniikka, värjäykset, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä.

## Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

## Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.