

Ysköksen irtosolututkimus

4080 Ex-Syto-1

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:

014 2691588 Sytologian laboratorio

Vastaukset:

014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Epäily bronkus- tai keuhkokarsinoomasta, hoidon seuranta.

Näyte

Aamuyskösnäyte; tavallisesti käytetään kolmena peräkkäisenä aamuna otettua näytettä. Kukin näyte tarvitsee oman lähetteen. Laadukkaan näytteen saamiseksi yskimisen on oltava tehokasta ja näytettä on oltava riittävästi. Tarvittaessa voi antaa ekspektorantteja. Koko saalis otetaan purkkiin.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteissä on liimattava potilastarra, jossa on viivakoodi ja näytenumero.

Näytteen käsittely

Näytteeseen lisätään välittömästi 50 % etanolia fiksaatiiviksi. Fiksaatiivia on oltava vähintään 2 – kertainen määrä näytteeseen nähden.

Lähetete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Sivelyvalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

Tulkinta/lausunto

Maligniteettiaste, solujakautuma ja poikkeavissa löydöksissä lausunto.

Huomautuksia